

Medio de montaje FluoreGuard

Descripción: El medio de montaje FluoreGuard es un medio soluble en agua diseñado para el deslizamiento semipermanente de preparaciones de portaobjetos fluorescentes. FluoreGuard se seca hasta convertirse en una capa semirrígida que elimina el daño a los tejidos debido al movimiento de los cubreobjetos y facilita el almacenamiento a largo plazo.

Usos/Limitaciones: Solo para uso en diagnóstico in vitro.
Aplicaciones histológicas.
Hacer no Úselo después de la fecha de vencimiento.
Tenga cuidado al manipular estos reactivos.

Disponibilidad:


<u>Artículo #</u>	<u>Volumen</u>
FMM030	30 ml
FMM060	60 ml


Almacenamiento: Almacene a temperatura ambiente.


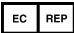
Procedimiento:

1. Aplique varias gotas de medio de montaje FluoreGuard y cubreobjetos.
2. Deje que FluoreGuard se seque durante 30 minutos antes de verlo. El producto se secará hasta obtener una forma semisólida durante la noche.
3. FluoreGuard es un medio de base acuosa y se puede eliminar sumergiéndolo en PBS durante la noche.

Precauciones: Evite el contacto con la piel y los ojos. Lavar después de usar. Observe todas las regulaciones ambientales federales, estatales y locales con respecto a la eliminación.

Almacenamiento: 18°
C  25° C

 Laboratorios ScyTek, Inc.
205 Sur 600 Oeste
Logan, UT 84321
435-755-9848
EE.UU.

 Representante autorizado en Europa
 (Solo asuntos regulatorios)
EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570
Molsnstraat 15
2513 BH Hague, Países Bajos