

Milieu de montage FluoreGuard

Description: Le support de montage FluoreGuard est un support soluble dans l'eau conçu pour le recouvrement semi-permanent de préparations de lames fluorescentes. FluoreGuard sèche en une couche semi-rigide qui élimine les dommages aux tissus dus au déplacement des lamelles et facilite le stockage à long terme.

Utilisations/Limites : Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement.
Applications histologiques.
Faire non Utilisez la date d'expiration dépassée.
Soyez prudent lors de la manipulation de ces réactifs.

Disponibilité:

<u>Article #</u>	<u>Volume</u>
FMM030	30 ml
FMM060	60 ml


Stockage: Conserver à température ambiante.


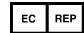
Procédure:

1. Appliquez plusieurs gouttes de support de montage FluoreGuard et une lamelle.
2. Laissez FluoreGuard sécher pendant 30 minutes avant de le visionner. Le produit sèche sous une forme semi-solide pendant la nuit.
3. FluoreGuard est un milieu à base aqueuse et peut être retiré en le trempant dans du PBS pendant la nuit.

Précautions: Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Laver après utilisation. Respectez toutes les réglementations environnementales fédérales, étatiques et locales concernant l'élimination.


Stockage : 18° C  25° C


 Laboratoires ScyTek, Inc.
205 Sud 600 Ouest
Logan, Utah 84321
435-755-9848
États-Unis

 Mandataire en Europe
 (Affaires réglementaires seulement)
EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570
Molsnstraat 15
2513 BH Hague, Pays-Bas

Mode d'emploi FMM-IFU		
Rev. Date: Jan. 3, 2008	Révision : 1	Page 2 de 2

P.O. Box 3286 - Logan, Utah 84323, U.S.A. - Tél. (800) 729-8350 - Télécopieur (435) 755-0015 - www.scytek.com

Stockage : 18° C  25° C

 Laboratoires ScyTek, Inc.
205 Sud 600 Ouest
Logan, Utah 84321
435-755-9848
États-Unis

Mandataire en Europe
 EC REP (Affaires réglementaires seulement)
EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570
Molsnstraat 15
2513 BH Hague, Pays-Bas