


La solución de Van Gieson

Descripción: La solución de Van Gieson está diseñada para su uso en la visualización histológica del colágeno en secciones de tejido. Este reactivo se utiliza en muchos procedimientos especiales de tinción, incluido el kit de tinción de hierro coloidal y el kit de tinción elástica (Verhoff modificado).

Colágeno: Rojo
 Fibras musculares: Amarillo
 Citoplasma: Amarillo

Usos/Limitaciones: No debe tomarse internamente.
 Solo para uso en diagnóstico in vitro.
 Aplicaciones histológicas.
 No lo use si los reactivos se vuelven turbios.
 No lo use después de la fecha de vencimiento.
 Tenga cuidado al manipular reactivos.
 No estéril.

Tejido de control: Pulmón
 Útero
 Músculo
 Riñón

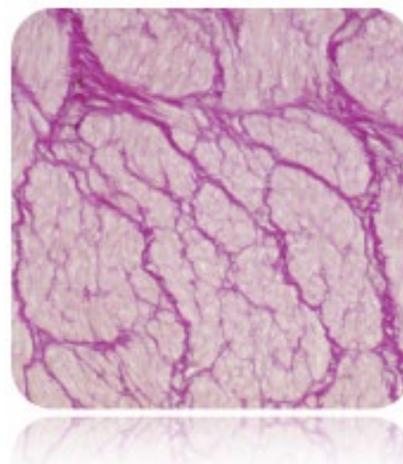

Información sobre pedidos y precios actuales en www.scytek.com

Disponibilidad:	Artículo #	Volumen
	VGS125	125 ml
	VGS500	500 ml
	VGS999	1000 ml

Almacenamiento: Conservar a 18-25°C.

Precauciones: Evite el contacto con la piel y los ojos.
 Nocivo si se ingiere.
 Siga todas las regulaciones federales, estatales y locales con respecto a la eliminación.

Procedimiento:

1. Desparafinar secciones si es necesario e hidratar hasta obtener agua destilada.
2. Aplique una cantidad adecuada de la solución de Van Gieson para cubrir completamente la sección de tejido e incube durante 1 minuto.

Almacenamiento: 18° C  25° C

 Laboratorios ScyTek, Inc.
 205 Sur 600 Oeste
 Logan, UT 84321
 EE.UU.

CE 

EC REP

EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570
 Molsnstraat 15
 2513 BH Hague, Países Bajos

P.O. Box 3286 - Logan, Utah 84323, U.S.A. - Tel. (800) 729-8350 - Tel. (435) 755-9848 - Fax (435) 755-0015 - www.scytek.com

3. Enjuague el portaobjetos con alcohol absoluto.
4. Deshidratar en 2 cambios de alcohol absoluto, claro, y montar en resina sintética.

Almacenamiento: 18°
C  25° C



Laboratorios ScyTek, Inc.
205 Sur 600 Oeste
Logan, UT 84321
EE.UU.

CE 

EC REP

EmergoEurope (31)(0) 70 345-

8570
Molsnstraat 15
2513 BH Hague, Países Bajos