

Istruzioni per l'uso Istruzioni per l'uso

Rev. Date: Jan. 3, 2008

Revisione: 1

Pagina 1 di 1

Casella postale 3286 - Logan, Utah 84323, U.S.A. - Tel. (800) 729-8350 - Fax (435) 755-0015 - www.scytek.com

Mezzo di montaggio FluoreGuard

Descrizione: Il mezzo di montaggio FluoreGuard è un mezzo solubile in acqua progettato per il montaggio

semipermanente di vetrini fluorescenti. FluoreGuard si asciuga in uno strato semirigido che

elimina i danni ai tessuti dovuti allo spostamento dei vetrini coprioggetti e facilita la

conservazione a lungo termine.

Usi/Limitazioni: Solo per uso diagnostico in vitro.

Applicazioni istologiche.

Fare non Utilizzare la data di scadenza precedente.

Prestare attenzione quando si maneggiano questi reagenti.

Disponibilità:

Articolo # Volume

Codice: FMM030 Flacone da 30 ml
Visualizzazione del materiale FMM060 Confezione da 60 ml

Immagazzinamento: Conservare a temperatura ambiente.

Procedimento:

- 1. Applicare diverse gocce di FluoreGuard Mounting Medium e vetrino coprioggetti.
- 2. Lasciare asciugare FluoreGuard per 30 minuti prima della visione. Il prodotto si asciugherà in una forma semisolida durante la notte.
- 3. FluoreGuard è un mezzo a base acquosa e può essere rimosso immergendolo in PBS durante la notte.

Precauzioni: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Lavare dopo l'uso. Osservare tutte le normative ambientali federali, statali e locali relative allo smaltimento.

Conservazione: 18° C 25° C

Laboratori ScyTek, Inc. 205 Sud 600 Ovest Logan, UT 84321 435-755-9848 U.S.A.

Rappresentante autorizzato in Europa

EC REP (Solo per gli affari regolatori)

Emergo Europe (31)(0) 70 345-8570

Molsnstraat 15

2513 BH L'Aia, Paesi Bassi